

Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali (SAELMT)



Primario: Dr. Zeno Bisoffi Ed.0 del 10/03/2010

http://www.tropicalmed.eu/ COPROPARASSITOLOGICO Pagina 1 di 7

CONCORDANZA DEL PROCESSO E DELL'OSSERVAZIONE MICROSCOPICA

Inserimento dei dati (programma in house)

Campione ripreparato

Per ogni campione è stato inserito: la data di preparazione, il preparatore, il lettore, chi ha scelto il campione primario, il risultato della lettura e il codice d'identificazione assegnato col seguente criterio:

Il referto corrispondente al barattolo primario è identificato con "Copro" e un numero progressivo univoco, seguito dalla lettera a che significa "prima lettura", es. Copro-4a.

Il referto del "campione controllo" corrispondente è identificato con "Copro" e lo stesso numero progressivo del Copro a (prima lettura), seguito dalle lettere ba che significa "seconda lettura campione a ripreparato", es. Copro-4ba.

Sedimento riletto

Per ogni campione è stato inserito: il preparatore, la data di lettura, il lettore, il risultato della lettura e il codice di identificazione assegnato col sequente criterio: Il referto corrispondente al sedimento primario è identificato con "Copro" e un numero progressivo univoco, seguito dalla lettera c che significa "prima lettura", es. Copro-4c.

Il referto del "sedimento controllo" corrispondente è identificato con "Copro" e lo stesso numero progressivo del Copro c (prima lettura), seguito dalle lettere de che significa "seconda lettura sedimento c riletto", es. Copro-4dc.

Criterio e valutazione:

Il risultato della lettura del campione a/c è considerato come riferimento per la valutazione del risultato del corrispondente campione ba/dc.

Criterio di valutazione:

(4)	0= identificati gli stessi parassiti (indipendentemente dalla quantità)	
(3/5)	+-1= missed versus una forma, rarissime o rare	
(2/6)	+-2= missed versus alcune	
(1/7)	+-3= missed versus parecchie o più	

7	+3 (NON ACCETTABILE)
6	+2 (LIMITE)
5	+1 (ACCETTABILE)
4	0 (CONCORDANTE)
3	-1 (ACCETTABILE)
2	-2 (LIMITE)
1	-3 (NON ACCETTABILE)

Corrispondendenza con il grafico

N.B.: i numeri tra parentesi corrispondono, nel grafico, al valore nell'asse delle ordinate.

il valore + indica che nel campione ba/dc è stato visto un qualche parassita in più che nel campione a/c, il valore - indica, invece, che nel campione ba/dc è stato visto un qualche parassita in meno che nel campione a/c, nelle quantità indicate dal numero che segue tale valore (scostamento).

Redatto da: Tec Maria Gobbo & Team RQ	Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi	MI 34
The state of the s		



Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali (SAELMT)



Primario:Dr. Zeno Bisoffi

Ed.0 del 10/03/2010

http://www.tropicalmed.eu/

Pagina 2 di 7

Dati 2014

CONCORDANZA COMPLESSIVA DEL PROCESSO (dalla preparazione alla lettura del campione)

Lettura — Concordante — Accettabile — Limite — Non accettabile

n° campioni: 47

