



Ospedale Classificato Equiparato
Sacro Cuore - Don Calabria
Presidio Ospedaliero Accreditato
Regione Veneto

Centro per le Malattie Tropicali
Direttore: Dr Bisoffi
U.O. Semplice di Microbiologia e SAELMT
Responsabile: Dr.ssa F. Perandin

Ed.1 del 10/01/2016

Sezione SAELMT

Pagina 1 di 7

COLORAZIONE TRICROMICA
CONCORDANZA DEL PROCESSO E DELL'OSSERVAZIONE MICROSCOPICA

Inserimento dei dati

Campione ripreparato

Per ogni campione è stato inserito: la data di preparazione, il preparatore, il lettore, chi ha scelto il campione primario, il risultato della lettura e il codice di identificazione assegnato col seguente criterio:

Il referto corrispondente al barattolo primario è identificato con "Trico" e un numero progressivo univoco, seguito dalla lettera a che significa "prima lettura", es. Trico -4a.

Il referto del "campione controllo" corrispondente è identificato con "Trico" e lo stesso numero progressivo del Trico a (prima lettura), seguito dalle lettere ba che significa "seconda lettura campione a ripreparato", es. Trico -4ba.

Vetrino riletto

Per ogni campione è stato inserito: il preparatore, la data di lettura, il lettore, il risultato della lettura e il codice di identificazione assegnato col seguente criterio:

Il referto corrispondente al vetrino primario è identificato con "Trico" e un numero progressivo univoco, seguito dalla lettera c che significa "prima lettura", es. Trico -4c.

Il referto del "vetrino controllo" corrispondente è identificato con "Trico" e lo stesso numero progressivo del Trico c (prima lettura), seguito dalle lettere dc che significa "seconda lettura vetrino c riletto", es. Trico -4dc.

Criterio e valutazione:

Il risultato della lettura del campione a / c è considerato come riferimento per la valutazione del risultato del corrispondente campione ba / dc.

Criterio di valutazione:

(4)	0= identificati gli stessi parassiti (indipendentemente dalla quantità)
(3/5)	+ -1= missed versus una forma, rarissime o rare
(2/6)	+ -2= missed versus alcune
(1/7)	+ -3= missed versus parecchie o più

7	+3 (NON ACCETTABILE)
6	+2 (LIMITE)
5	+1 (ACCETTABILE)
4	0 (CONCORDANTE)
3	-1 (ACCETTABILE)
2	-2 (LIMITE)
1	-3 (NON ACCETTABILE)

Corrispondenza con il grafico

N.B.: i numeri tra parentesi corrispondono, nel grafico, al valore nell'asse delle ordinate.

il valore + indica che nel campione ba / dc è stato visto un qualche parassita in più che nel campione a / c, il valore - indica, invece, che nel campione ba / dc è stato visto un qualche parassita in meno che nel campione a / c, nelle quantità indicate dal numero che segue tale valore (scostamento).

Redatto da:	Approvato da: Dr. ssa F. Perandin



Ospedale Classificato Equiparato
Sacro Cuore - Don Calabria
Presidio Ospedaliero Accreditato
Regione Veneto

Centro per le Malattie Tropicali
Direttore: Dr Bisoffi
U.O. Semplice di Microbiologia e SAELMT

Responsabile: Dr.ssa F. Perandin

Ed.1 del 10/01/2016

Sezione SAELMT


Pagina 2 di 7

Dati 2016

CONCORDANZA COMPLESSIVA DEL PROCESSO (dalla preparazione alla lettura del campione)

● Lettura — Concordante — Accettabile — Limite — Non accettabile

n° campioni: 16

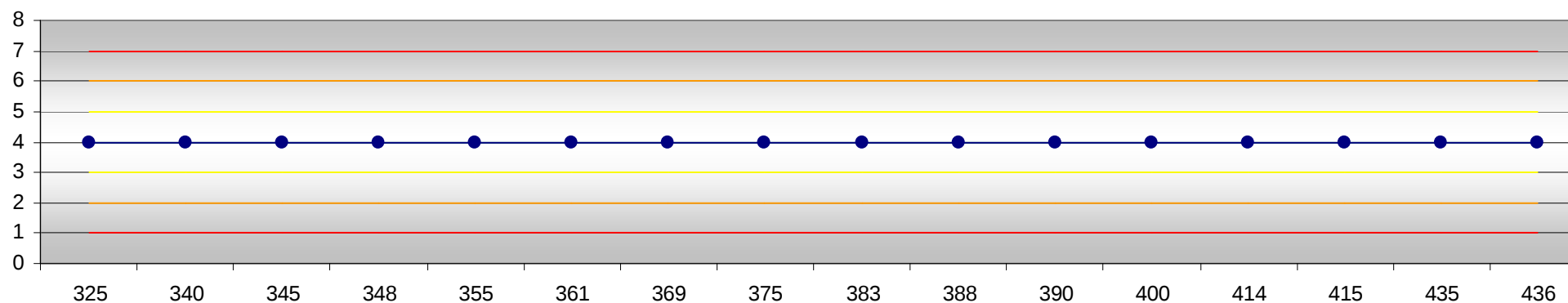

Redatto da:

Approvato da: Dr. ssa F. Perandin



Ospedale Classificato Equiparato
Sacro Cuore - Don Calabria
Presidio Ospedaliero Accreditato
Regione Veneto

Centro per le Malattie Tropicali
Direttore: Dr Bisoffi
U.O. Semplice di Microbiologia e SAELMT

Responsabile: Dr.ssa F. Perandin

Ed.1 del 10/01/2016


Sezione SAELMT

Pagina 3 di 7


Concordanza del processo valutata per singolo microscopista

● Lettura — Concordante — Accettabile — Limite — Non accettabile

Microscopista 1: n° campioni 14

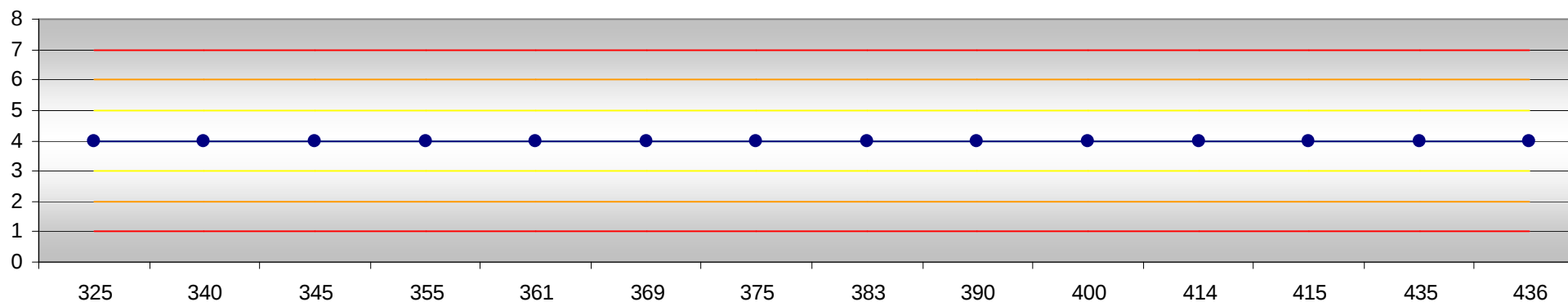

Microscopista 2: n° campioni 2

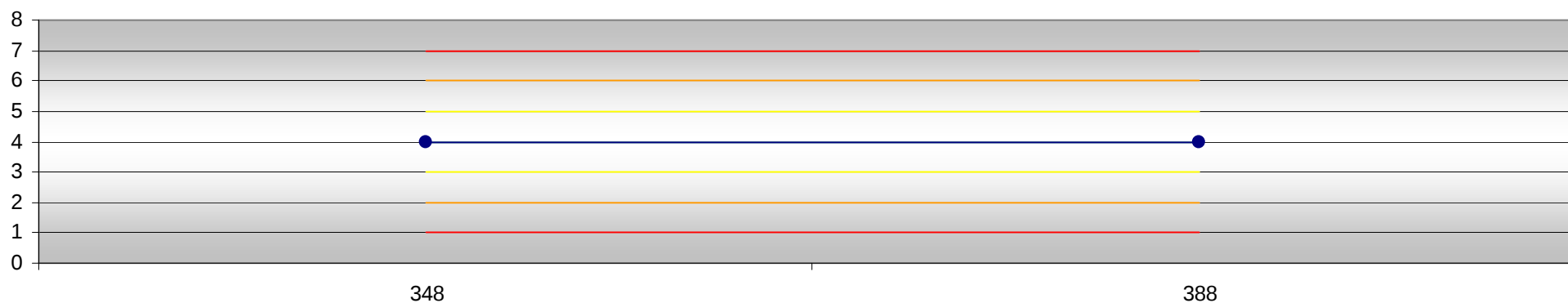

Redatto da:

Approvato da: Dr. ssa F. Perandin



Ospedale Classificato Equiparato
Sacro Cuore - Don Calabria
Presidio Ospedaliero Accreditato
Regione Veneto

Centro per le Malattie Tropicali
Direttore: Dr Bisoffi
U.O. Semplice di Microbiologia e SAELMT

Responsabile: Dr.ssa F. Perandin

Ed.1 del 10/01/2016


Sezione SAELMT

Pagina 4 di 7

Concordanza del processo intramicroscopista

● Lettura — Concordante — Accettabile — Limite — Non accettabile

Microscopista 1: n° campioni 13

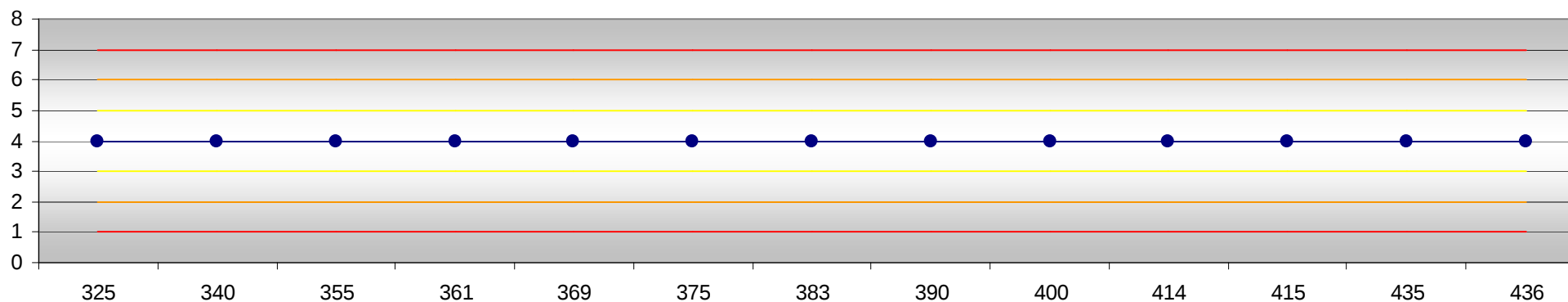

Microscopista 2: n° campioni 0

Redatto da:

Approvato da: Dr. ssa F. Perandin



Ospedale Classificato Equiparato
Sacro Cuore - Don Calabria
Presidio Ospedaliero Accreditato
Regione Veneto

Centro per le Malattie Tropicali
Direttore: Dr Bisoffi
U.O. Semplice di Microbiologia e SAELMT
Responsabile: Dr.ssa F. Perandin

Ed.1 del 10/01/2016


Sezione SAELMT

Pagina 5 di 7

CONCORDANZA COMPLESSIVA DELL'OSSERVAZIONE MICROSCOPICA (rilettura del campione già letto)

—●— Lettura — Concordante — Accettabile — Limite — Non accettabile

n° campioni: 19

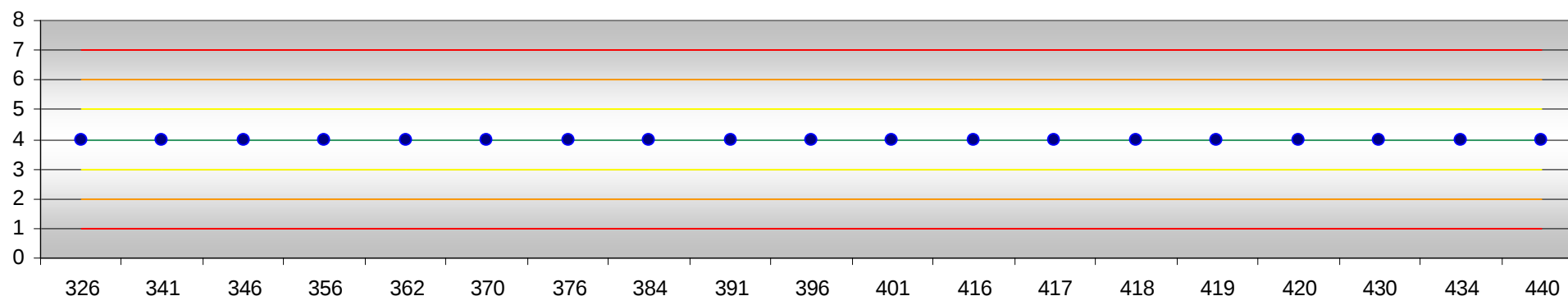

Redatto da:

Approvato da: Dr. ssa F. Perandin



Ospedale Classificato Equiparato
Sacro Cuore - Don Calabria
Presidio Ospedaliero Accreditato
Regione Veneto

Centro per le Malattie Tropicali
Direttore: Dr Bisoffi
U.O. Semplice di Microbiologia e SAELMT

Responsabile: Dr.ssa F. Perandin

Ed.1 del 10/01/2016


Sezione SAELMT

Pagina 6 di 7

Concordanza dell'osservazione microscopica valutata per singolo microscopista

● Lettura — Concordante — Accettabile — Limite — Non accettabile

Microscopista 1: n° campioni: 19

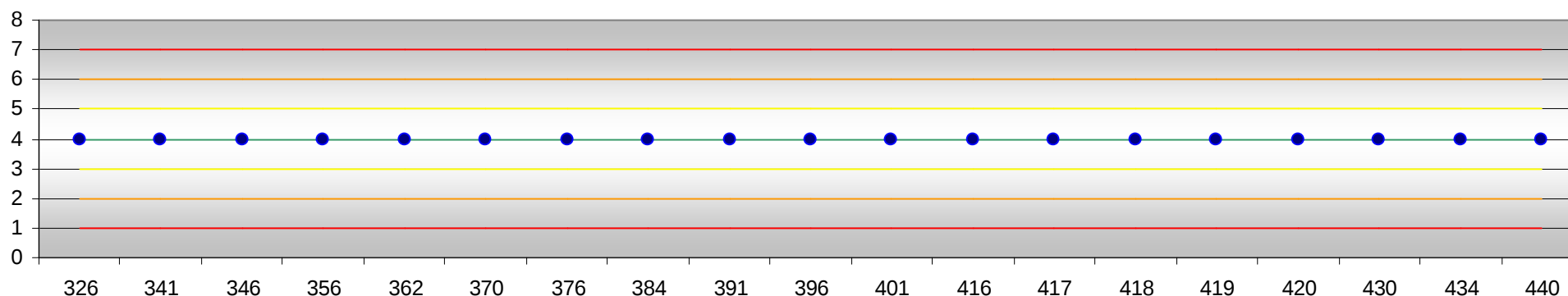

Microscopista 2: n° campioni: 0

Redatto da:	Approvato da: Dr. ssa F. Perandin



Ospedale Classificato Equiparato
Sacro Cuore - Don Calabria
Presidio Ospedaliero Accreditato
Regione Veneto

Centro per le Malattie Tropicali
Direttore: Dr Bisoffi
U.O. Semplice di Microbiologia e SAELMT

Responsabile: Dr.ssa F. Perandin

Ed.1 del 10/01/2016


Sezione SAELMT

Pagina 7 di 7

Concordanza dell'osservazione microscopica intramicroscopista
Entrambe le letture (campione e controllo) eseguite dallo stesso microscopista

● Lettura — Concordante — Accettabile — Limite — Non accettabile

Microscopista 1: n° campioni: 19

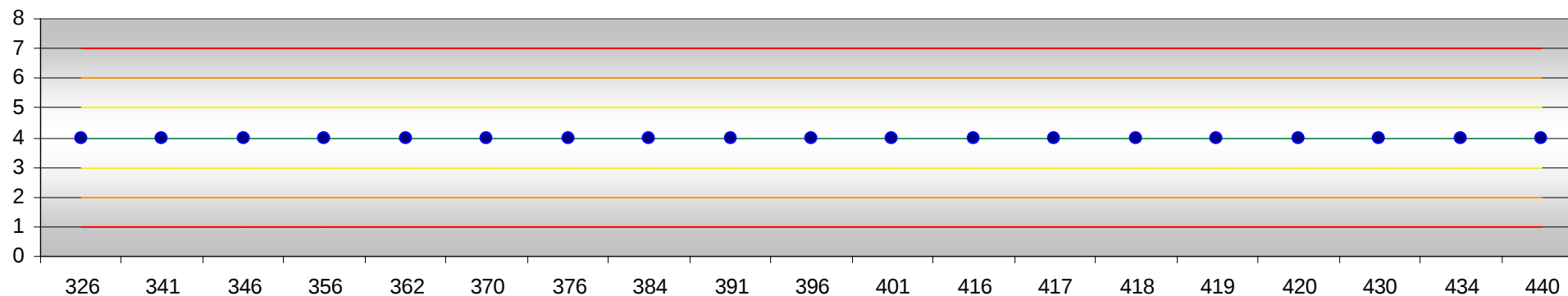

Microscopista 2: n° campioni: 0

Redatto da:

Approvato da: Dr. ssa F. Perandin